

- 품목명: 측정 및 유도용 기구
- 모델명: 98460
- 수입품목허가번호: 수허10-933호
- 제조의뢰자: Halyard Health, Inc.(미국)
- 제조자: Avent S. de R.L. de C.V(멕시코)
- 제조번호: 제조원 표시사항(LOT) 참조
- 제조연월: 제조원 표시사항(㉮)참조
- 사용목적: 위장용 급식 튜브를 선택하기 위해 위장 내벽부터 복부 외피까지의 두께를 측정하기 위한 기기이다.
- 저장방법: 실온보관
- 포장단위: 10pouch / case
- 사용방법 및 사용시 주의사항은 홈페이지 www.ecora.co.kr 상단메뉴 중 한글사용설명서 - Avanos - HHI-10933 R0 1906 에서 다운로드 하실 수 있습니다.
- 수입자: 주식회사 에코라/ 서울특별시 강남구 봉은사로 460 (삼성동 115-27, 금척타워 3층)

“본 제품은 일회용 멸균의료기기이므로 재사용을 금합니다.”

■ 사용방법 및 사용시 주의사항 첨부문서

1. 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- (1) 포장에서 꺼내어 손상 여부를 검사합니다.
- (2) Luer 슬립 주사기를 사용하여 5ml의 멸균수 또는 증류수를 벌룬 포트를 통해 벌룬에 채웁니다.
- (3) 주사기를 제거하고 벌룬을 천천히 눌러 누출 여부를 확인하여 벌룬에 이상이 없는지 확인합니다. 육안으로 벌룬이 대칭 구조를 갖추고 있는지 검사합니다. 손가락 사이에 벌룬을 천천히 굴려 대칭 구조를 맞출 수 있습니다. 주사기를 다시 삽입하고 벌룬에서 모든 물을 제거합니다.
- (4) 측정기기의 끝을 수용성 윤활제나 물로 적십니다

나. 사용방법 및 조작 순서

- (1) 삽입 구멍을 통해 기기를 위장으로 삽입합니다. 0.038" 가이드와이어를 사용하여 쉽게 배치할 수 있습니다. 절대로 힘을 가하지 마십시오.
- (2) 5ml 물이나 염수로 풍선을 부풀립니다.
- (3) 위장의 안쪽 벽에 저항을 느낄 수 있을 때까지 삽입 구멍 측정 기기를 천천히 당깁니다.
- (4) 환자가 반듯이 누운 자세로 플라스틱 디스크를 삽입 구멍으로 밀어 내립니다.
- (5) 디스크 맨 위에서 표시를 읽습니다. 실제 삽입 구멍 길이에 1mm ~ 2mm가 추가되면 정확히 맞추기 위해 약간 움직일 수 있습니다. 이 기기의 정확성은 ± 0.125 cm입니다.
- (6) 디스크를 삽입 구멍에서 밀어 빼낸 후 환자를 똑바로 선 자세로 들어 올립니다. 디스크를 삽입 구멍으로 밀어 내립니다.
- (7) 디스크 맨 위에서 표시를 읽습니다.
- (8) 2회의 판독값(cm)의 평균을 기록합니다.

다. 사용 후 보관 및 관리

- (1) 일회용이므로 사용 후 폐기한다.
- (2) 재사용하지 않는다.

2. 사용시 주의사항

- (1) 패키지가 손상되거나 제품에 이상이 있을 시 사용하지 마십시오.
- (2) 본 제품을 경장영양 및 약물 투입에 사용하지 마십시오.
- (3) 복수증에 국한하지 않고 간 문맥압 항진증, 복막염 및 고도 비만 환자의 경우 공장 급식튜브 배치를 금지합니다.
- (4) 벌룬은 절대 공기로 채우지 마십시오. 공기가 새어 나와 튜브가 움직일 수 있습니다.
- (5) 벌룬을 위복벽 고정술 장치로 사용하지 마십시오. 사용할 경우 위장을 복벽에 고정할 수 없습니다.
- (6) 벌룬에 대조제를 주입하지 마십시오.
- (7) 총 벌룬 체적은 5ml를 초과하지 마십시오.
- (8) 튜브 주입 시 과도한 힘을 사용하지 마십시오. 과도하게 힘을 줄 경우 튜브 끝 부분에 의한 위장의 손실을 일으킬 수 있습니다.
- (9) 튜브 끝을 매끄럽게 하기 위하여 광유나 바세린을 사용하지 마십시오.
- (10) 공기 또는 염수가 아닌 멸균수 또는 증류수를 벌룬에 채웁니다. 염수는 소금 결정이 생성되어 벌룬 밸브 또는 루멘이 막힐 수 있으며 공기가 새어나와 벌룬 부피가 줄어들 수 있습니다. 과도하게 팽창할 경우 루멘과 간섭되거나 벌룬 수명이 줄어들 수 있으며 팽창 정도가 부족할 경우 튜브를 적절하게 고정하지 못하기 때문에 권장량의 물을 사용해야 합니다.
- (11) 튜브 사용 중 과다한 육아종, 피부손상, 감염, 위 또는 십이지장 궤양, 복강내 누출, 압박 괴사가 있는 경우에는 의료진과 상의하십시오.